



Bones

Milestone

112 Ace

Anhang

www.bones.ch

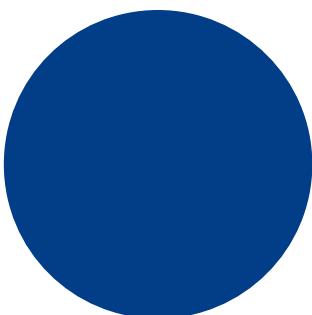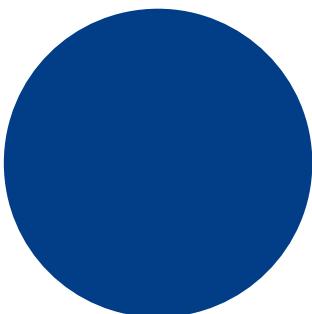

1. Uhr

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung der Uhr. Die Uhr ist eine Option, die beim Kauf des Milestone 112 Ace oder auch nachträglich erworben werden kann. Hat Ihr M112 Ace noch keine Uhr und Sie möchten diese erwerben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1.1. Uhr abfragen

Zur Abfrage der Uhr halten Sie eine kurze Zeit die Selektor-Taste gedrückt und lassen sie wieder los. Die Drückdauer ist leicht zu merken: Sprechen Sie einfach im Geiste langsam das Wort „Milestone“. Auf diese Weise sagt Ihnen der Milestone 112 Ace nach dem Loslassen der Taste klar und deutlich die Uhrzeit in Stunden und Minuten an.

Die Wartezeit beim Drücken der Taste wurde eingefügt, damit bei der Wahl der Ordner nicht aus Versehen die Uhrzeit angesagt wird.

1.2. Uhr stellen

Um die Uhrzeit zu stellen, drücken Sie die Selektor-Taste und halten diese mindestens für 4 Sekunden gedrückt. Danach ertönt die Ansage „Stunde stellen“ und der Milestone sagt die aktuelle Uhrzeit an.

Ändern Sie nun mit den Tasten Links und Rechts die Stunden. Nach links wird die Stundenzahl um eins erniedrigt, nach rechts um eins erhöht. Nach jeder Änderung wird die eingestellte Zeit angesagt.

Sind Sie mit dem Einstellen der Stunden fertig, so drücken Sie die Play-Taste. Der Milestone spricht nun die Ansage „Minuten einstellen“. Danach können Sie auf die gleiche Weise die Minuten stellen. Mit nochmaligem Druck auf die Play-Taste beenden Sie das Stellen der Uhr und der Milestone sagt noch einmal die eingestellte Uhrzeit an.

2. Sonstige Änderungen

2.1. Starten

Der Milestone 112 Ace kann nun mit allen Tasten auf der Frontseite geweckt werden, nicht nur mit der Play-Taste. Mit der Selektor-Taste startet der Milestone nicht, um ungewolltes Aufstarten durch versehentlichen Druck z.B. in der Tasche zu vermeiden.

2.2. Sofortaufnahme

Es ist nun möglich, eine Notiz sowohl im Betriebszustand als auch aus dem Stromsparmodus heraus aufzunehmen. Drücken Sie die Aufnahmetaste und halten Sie diese gedrückt bis der Signalton für Aufnahmefähigkeit ertönt. Nun können Sie Ihre Notiz aufsprechen.

2.3. Interner Speicher

Der Interne Speicher ist nun 2.5 GB gross und bietet Platz für ungefähr 80 Stunden Notizen.

2.4. Aufnahmeequalität

Die Aufnahmeequalität wurde verbessert. Notizen werden nun mit 44.1 kHz aufgenommen.

2.5. Wiedergabelautstärke

Die Lautstärke kann nun für den Lautsprecher und für den Kopfhörer getrennt eingestellt werden. Der Milestone 112 Ace merkt sich automatisch Ihre jeweilige Einstellung.

2.6. Akkulaufzeit

Die Hardware wurde zu Gunsten der Laufzeit optimiert. Der Milestone 112 Ace bietet nun eine Betriebszeit von bis zu 19 Stunden.